

Instrucțiuni de utilizare

Cod articol: 5A49 , Easy gel

Branturile 5A49 Easy Gel sunt destinate pentru:

- incaltaminte zilnica;
- incaltaminte sport;
- Incaltaminte de protectie;

Mod de utilizare:

Daca este necesar, taiati branturile pentru a se potrivi in interiorul incaltamintei. Taiati de-a lungul conturului care se potriveste cu dimensiunea incaltamintei sau folositi brantul original ca model.

Pentru cele mai bune rezultate, scoateti branturile existente si inlocuiti-le cu branturile 5A49 Easy Gel, avand partea de gel orientata in jos.

Inlocuiti branturile care prezinta semne de uzura; recomandat la fiecare 4 luni.

Ambalare, depozitare brantul este ambalat în cutii și trebuie să fie depozitat in spatiu uscat, la temperatura camerei, in ambalajul original.

Conservare si eliminare/casare:Datorită mai multor factori (umiditatea în timpul depozitării și modificarea structurii materialelor în timp) nu este posibil să se stabilească cu certitudine durata de timp în care brantul poate fi pastrat în depozit.

Eliminarea se face in conformitate cu reglementarile europene referitoare la protectia mediului si reciclarea.

Materiale componente sunt clasificate ca deșeuri ne-periculoase și sunt identificate de Codul european al deșeurilor: Material textil: 04.02.99, elastomer și polimer: 07.02.99.

Fisa completă de informații se poate obține de la sediul producatorului sau de pe site: <https://magazin.renania.ro/>

SC RENANIA TRADE SRL, str. Dezrobirii nr.19,540240 Târgu Mureș



+40 265 264 817